


Guide de démarrage rapide CEFALY

Lisez le manuel d'utilisation CEFALY pour obtenir des instructions détaillées avant d'utiliser le dispositif.

Configuration et utilisation

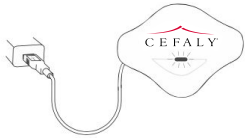

- 1) À l'aide de l'adaptateur secteur et du câble fournis, chargez complètement le dispositif. Une fois celui-ci branché, un voyant vert se mettra à clignoter. Un voyant vert fixe (qui ne clignote plus) indique un chargement complet (~ 3 heures).



- 2) Lavez votre front (entre les sourcils et au-dessus) avec de l'eau et du savon; séchez totalement la zone avant CHAQUE séance.



- 3) Ouvrez le paquet de l'électrode réutilisable, retirez la pochette en plastique et décollez doucement l'électrode. Conservez le paquet et la pochette en vue du rangement de l'électrode avant l'utilisation suivante.



- 4) À l'aide d'un miroir, positionnez l'électrode de façon à ce que la base de celle-ci se trouve entre les sourcils et les ailes au-dessus. Une fois l'électrode en place, passez vos doigts dessus pour l'aplatir et vous assurer qu'elle est parfaitement en contact avec votre peau.



- 5) Approchez le dispositif de votre front; les aimants à l'arrière de celui-ci doivent faire face à la zone de contact magnétique se trouvant sur l'avant de l'électrode. Le dispositif sera attiré par l'électrode et se mettra automatiquement en place. Une fois le dispositif en place, choisissez le programme souhaité et commencez.

Le dispositif s'éteindra automatiquement à la fin de la séance de traitement. Tirez sur le dispositif pour l'éloigner de l'électrode. Ensuite, retirez l'électrode de votre front et replacez-la dans la pochette en plastique. Remettez la pochette dans le paquet et conservez-le dans un sac en plastique fermé.

✓ INDICATIONS – CEFALY est indiqué pour :

- Le traitement des migraines aiguës avec ou sans aura chez les patients de plus de 18 ans.
- Le traitement préventif des migraines épisodiques chez les patients de plus de 18 ans.


✗ CONTRE-INDICATIONS – N'UTILISEZ PAS CEFALY SI :

- Vous avez des implants métalliques ou électroniques dans la tête.
- Vous souffrez de douleurs d'origine inconnue.
- Vous portez un pacemaker cardiaque ou un défibrillateur portable ou implanté. Cela peut interférer avec le rythme cardiaque, voire provoquer un choc électrique ou la mort.

Conseils pour la réussite du traitement


Utilisez le programme de CRISE à l'apparition d'une migraine.

- Programme de 60 minutes conçu pour traiter rapidement les crises de migraine.
- Pour activer le programme pour migraine aiguë, appuyez une fois sur le bouton du dispositif.
- Vous entendrez alors un bip qui indique que le programme de CRISE est sélectionné.
- Au bout de quelques secondes, le voyant du dispositif émettra un clignotement simple, et continuera pendant toute la durée de la séance.
- Suivez l'intégralité du programme de CRISE (cycle de 60 minutes).

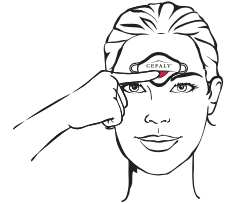

Utilisez le programme de PRÉVENTION en-dehors des crises de migraine.

- Programme de 20 minutes conçu pour le traitement préventif des migraines.
- Pour activer le programme de PRÉVENTION, appuyez deux fois sur le bouton du dispositif.
- Vous entendrez deux bips indiquant que le programme de PRÉVENTION est sélectionné.
- Au bout de quelques secondes, le voyant du dispositif émettra un clignotement double, et continuera pendant toute la durée de la séance.
- Une utilisation quotidienne conforme du programme de PRÉVENTION peut permettre de réduire le nombre de jours de migraines.

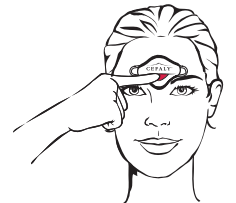

Remarques importantes

- Si vous ressentez de l'inconfort pendant les 14 premières minutes, alors que l'intensité augmente, appuyez immédiatement une fois sur le bouton (un bip) afin de stabiliser l'intensité pendant le reste du programme.
- Nous vous recommandons d'augmenter l'intensité de façon graduelle sur plusieurs jours et plusieurs séances de traitement afin d'atteindre votre niveau de tolérance maximum pour le traitement.
- Il est également possible de contrôler l'intensité manuellement. 10 secondes après le début du programme, maintenez le bouton du dispositif enfoncé jusqu'à atteindre le niveau d'intensité désiré (bips rapides). Vous devrez maintenir le bouton enfoncé pendant environ 30 secondes (ou jusqu'à l'arrêt des bips) pour atteindre l'intensité maximum.
- Si vous souhaitez arrêter ou interrompre une séance, quelle qu'en soit la raison, retirez le dispositif de l'électrode. (Le dispositif émettra une série de bips successifs indiquant l'interruption de la séance.)
- Quelques semaines d'utilisation régulière et conforme peuvent être nécessaires pour obtenir une amélioration notable.

Besoin d'aide?

www.cefaly.com | Courriel : cs@cefaly.com

Numéro gratuit : 1-844-475-7100, du lundi au vendredi
de 9 h 00 a.m. à 5 h 00 p.m. ET

CEFALY
TECHNOLOGY

Consultez le manuel d'utilisation ou contactez
CEFALY pour obtenir des informations concernant
les indications, les avertissements et les
contre-indications du dispositif.